



DÉTECTION D'UNE INFECTION AU VIH ET/OU VHC

Procédure simplifiée avec EXACTO Pro® Test HIV et First Response® HCV



1 Désinfecter le doigt à piquer. Opter pour le majeur ou l'annulaire.



2 Appliquer l'autopiqueur sur le bout du doigt. Déclencher la piqûre en pressant fortement l'autopiqueur contre la peau du doigt.



3 Masser le doigt sur la longueur pour former une goutte de sang suspendue.



4 Recueillir la goutte de sang à l'aide de la pipette fournie dans le kit **FIRST RESPONSE® HCV** en approchant la pipette horizontalement sans appuyer sur la poire.



5 Répéter les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que le sang atteigne le repère noir de la pipette.



6 Transférer le contenu de la pipette dans le puits «S» de la cassette **FIRST RESPONSE® HCV**.



7 Répéter l'étape 3 pour former une nouvelle goutte de sang suspendue.




8 Prélever la goutte de sang à l'aide du prélève-goutte fourni dans le kit **EXACTO Pro® Test HIV**, en mettant en contact la cupule du prélève-goutte avec la goutte de sang.



9 Transférer le contenu de la pipette dans le puits «SANG» de la cassette **EXACTO Pro® Test HIV**.



10 - Ajouter **1 goutte** de diluant dans le puits «S» de la cassette **FIRST RESPONSE® HCV**
- Ajouter **2 gouttes** de diluant dans le puits «DILUANT» de la cassette **EXACTO Pro® Test HIV**.

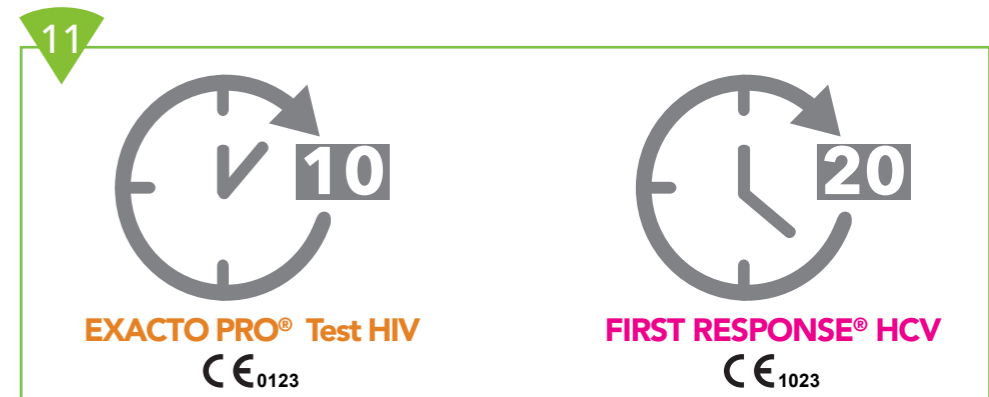

11 Lire le résultat à **10 minutes** pour **EXACTO Pro® Test HIV** et à **20 minutes** pour **FIRST RESPONSE® HCV**. Ne pas lire au-delà du temps indiqué.

BIO SYNEX
EASY DIAGNOSTICS FOR LIFE

BIO SYNEX SA
22 Boulevard Sébastien Brant
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN


☎ 03 88 78 80 88
✉ client.pro@biosynex.com
@ www.biosynex.com



Lire attentivement les instructions figurant sur l'étiquetage et/ou les notices d'utilisation des réactifs.

Interprétation des résultats

Résultats positifs

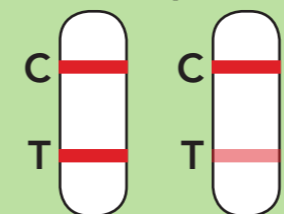

Résultat négatif



Résultats invalides

