

Une alternative au prélèvement sanguin veineux (pour le dépistage de l'hépatites B, C, du VIH et de la syphilis)



Commande de kits de prélèvement à Spot to Diag, une activité du laboratoire de virologie au CHU de Montpellier, demande par mail à spot-to-diag@chu-montpellier.fr
(Ce kit est un assemblage de dispositifs médicaux marqués CE, il est destiné aux professionnels de santé)



Prélèvement capillaire sur papier buvard
(voir la procédure de prélèvement)



Envoi du papier buvard au CHU de Montpellier
(par courrier postal avec une enveloppe pré-affranchie)

Analyses sérologiques réalisées
au laboratoire de virologie



Envoi des résultats
par courrier

Procédure de prélèvement sur papier buvard


1

Ouvrir le kit et sortir tous les éléments



2

Se laver les mains à l'eau chaude 30 sec

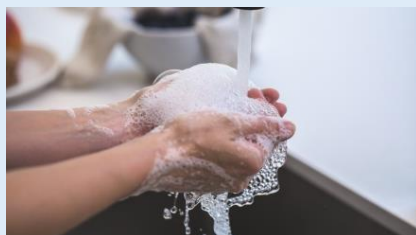


3

Nettoyer le doigt avec le tampon alcoolique



4

Piquer la pulpe du doigt avec la lancette
(en appuyant fortement)

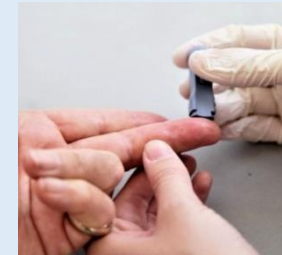


5

Presser le doigt pour obtenir les gouttes de sang



6

Déposer les gouttes sur le buvard (sur les spots)

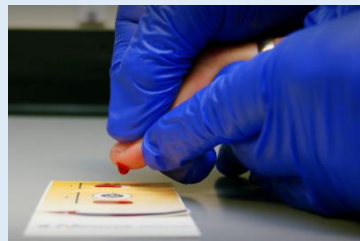

7

Laisser sécher le buvard au minimum 1h



8

Mettre dans le sachet plastique et envoyé par La Poste
(avec le **formulaire de prescription** complété)




Exemples de remplissage de buvards




Spots bien remplis



Spots bien rempli mais pas assez de spots de sang pour toutes les analyses

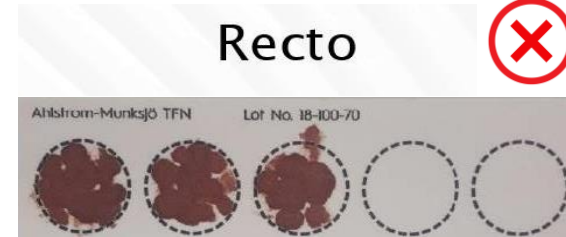

Impossible de réaliser les analyses

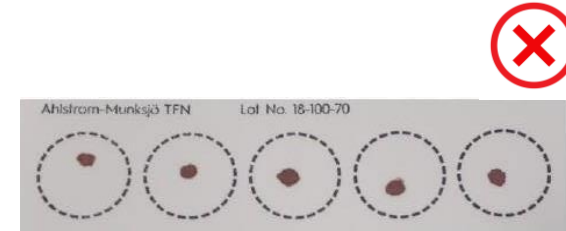

Impossible de réaliser les analyses