

Détection d'une Infection au VHB

Procédure simplifiée avec First Response® HBsAg




Désinfecter le doigt à piquer. Opter pour le majeur ou l'annulaire.



Appliquer l'autopiqueur sur le bout du doigt. Déclencher la piqûre en pressant fortement l'autopiqueur contre la peau du doigt.



Masser le doigt sur la longueur pour former une grosse goutte de sang suspendue.

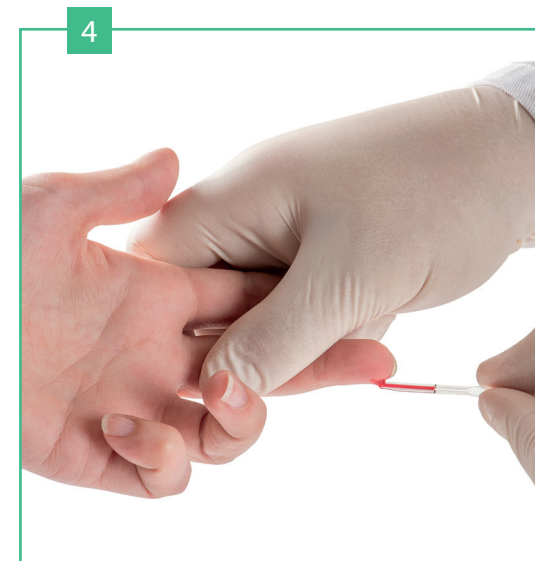


Recueillir la goutte de sang à l'aide de la pipette fournie dans le kit, en approchant la pipette horizontalement sans appuyer sur la poire.




Répéter les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que le sang atteigne le repère coloré de la pipette.



Vider le contenu de la pipette dans le puits «S» de la cassette, en appuyant sur la poire.

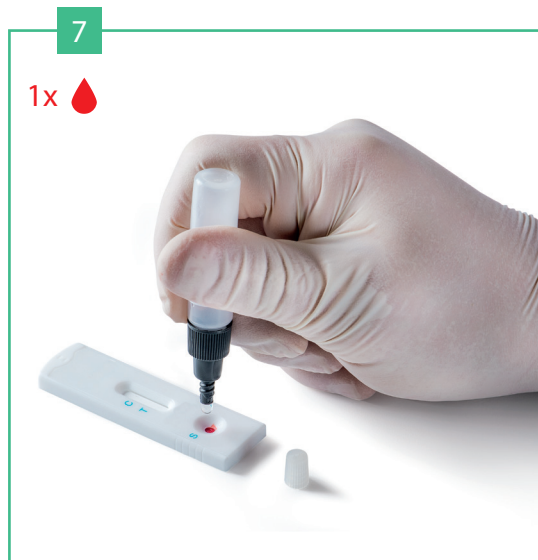


Ajouter 1 goutte de diluant dans le puits «S» de la cassette.

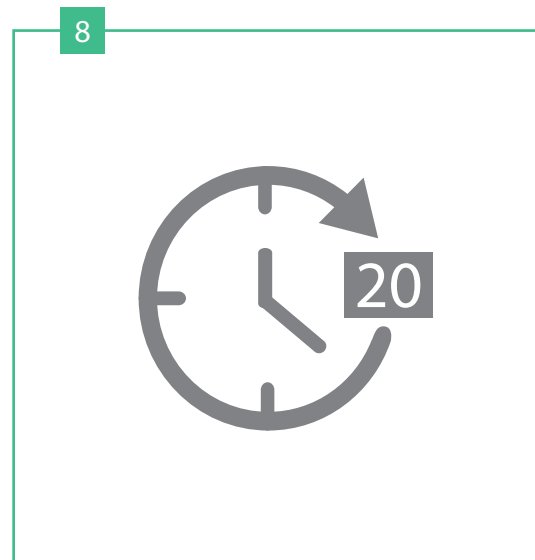

Lire le résultat à 20 minutes. Ne pas lire au-delà de 25 minutes.


Interprétation des résultats

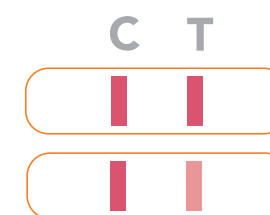

Résultats positifs



Résultat négatif

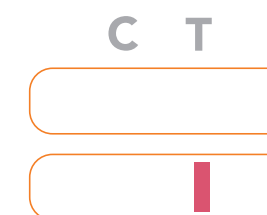

Résultats invalides

CE 1434



Lire attentivement les instructions figurant sur l'étiquetage et/ou les notices d'utilisation des réactifs.

BIO SYNEX

BIOSYNEX SA, 22 - Boulevard Sébastien Brant - 67400 Illkirch-Graffenstaden

03 88 78 80 88
client.pro@biosynex.com
www.biosynex.com

POS_VHC_V01202212R01_FR

