


# Détection des anticorps du virus de l'Hépatite C

## Procédure simplifiée HCV Rapid test (REF: ITP01153-TC10)

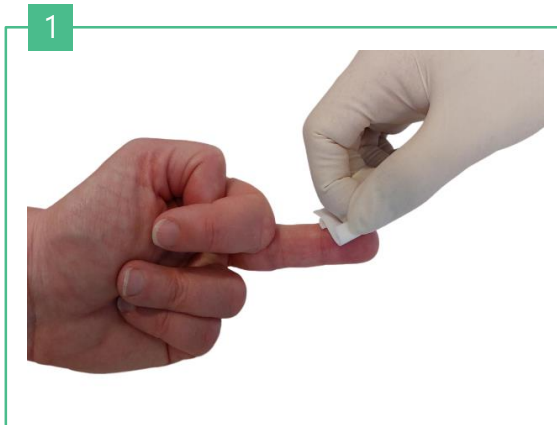


Utiliser la lingette antiseptique fournie pour désinfecter le doigt au niveau de l'endroit où vous souhaitez effectuer le prélèvement. Opter pour le majeur ou l'annulaire. **Laisser sécher avant de procéder au prélèvement.**




Placer la lancette de sécurité fournie avec le kit au bout du doigt puis déclencher la piqûre **en appuyant légèrement sur le point de prélèvement.**



**Essuyer la 1<sup>ère</sup> goutte de sang avec une compresse stérile** puis masser le doigt sur la longueur pour former une grosse goutte de sang suspendue.

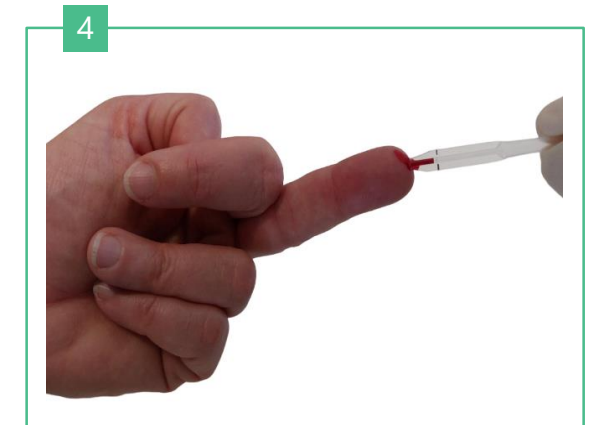

Recueillir la goutte de sang en approchant la pipette **horizontalement sans appuyer sur la poire**. Le sang monte par capillarité jusqu'au trait noir (10 µL). Un sachet de 20 pipettes (REF.1010-10) est fournie avec chaque lot de kit à part.

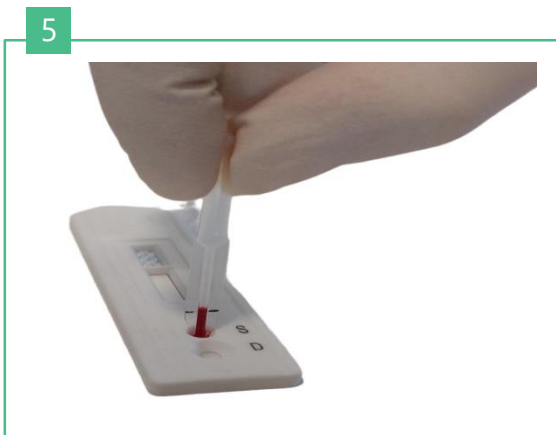


Placer la pipette **verticalement au contact du puit « S »** puis vider le contenu en appuyant sur la poire.





Ajouter immédiatement **2 gouttes de diluant** dans le puits «D» de la cassette.

### Interprétation des résultats

  
Lire le résultat à **15 minutes**  
Ne pas lire au-delà de 20 min

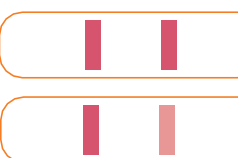C T  
  
**Résultats positifs**

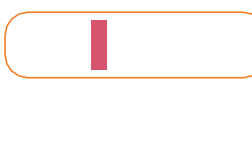C T  
  
**Résultat négatif**

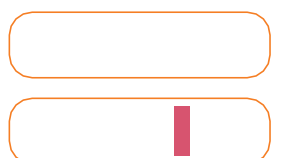C T  
  
**Résultats invalides**