



QUELQUES INFORMATIONS CONCERNANT L'UTILISATION DU FIBROSCAN DE LA COORDINATION HEPATITES OCCITANIE

Ouverture de la valise Fibroscan **sans code**

Accès au Fibroscan **sans mot de passe**

Création de chaque patient dans le Fibroscan sur la base :

- des trois premières lettres de son nom
- des trois premières lettres de son prénom
- de sa date de naissance
- du code Fibroscan (dernier numéro +1)

Pour retrouver la correspondance entre les coordonnées complètes du patient et son code, ce dernier doit être noté dans son dossier ainsi que le numéro du Fibroscan.

Copie du résultat du Fibroscan du patient sur une clé USB en cliquant sur le carré PDF

Ce résultat doit être stocké dans le dossier du patient.

Une édition de ce résultat peut-être remise au patient.

Accès possible aux archives (limitées à l'année en cours) du Fibroscan ensuite

Pensez en parallèle à saisir les données dans le questionnaire mis à votre disposition :

<https://forms.gle/M5EeNkvntssD1hc76>

(Accès possible depuis un smartphone dans un format adapté)

La sonde du Fibroscan est très fragile.

Le gel se retire avec un produit ne contenant pas d'alcool

(Surfamnios Premium après dilution ou Amukine)

et après avoir stoppé la sonde (bouton carré dans un ovale en bas à droite de l'écran).

Le Fibroscan doit toujours être chargé notamment avant une action hors les murs.

La batterie lithium supporte mal la décharge complète et le redémarrage peut être complexe et très long.

Pensez à laisser le gel dans la valise et à réapprovisionner si besoin. Merci.